


吸引式固定バッグ取扱説明

- ① 固定する部位に合った吸引式固定バッグを用意します。




- ② 固定具、あるいは寝台の上に吸引式固定バッグを置き、その上に患者様を寝かせます。

- ③ コネクターに吸引ポンプをつなぎます。その際、カチッと音がするまで差し込みます。

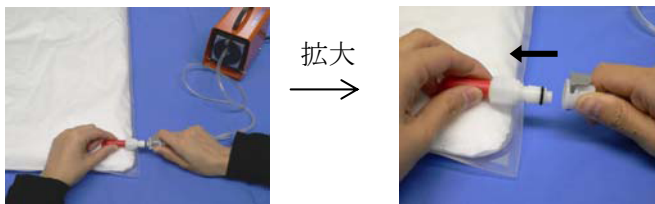


- ④ 形状を作りやすくするため、軽く空気を抜きます。

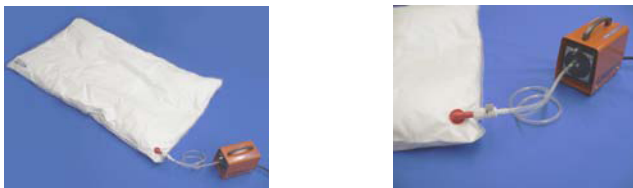

- ⑤ 形状を作りながら、硬くなるまで空気を抜きます。

- ⑥ 所定の硬さになったらポンプを外します。

※グレーの部分を押す

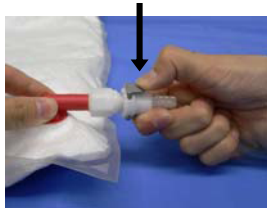

- ⑦ コネクターに付属のキャップを被せます。(誤って空気が入らないようにするため)



- ⑧ 完成

※ 2～3週間経つと僅かに空気が入ることがあります。

その際は、追加吸引を行ってください。

エンジニアリングシステム株式会社
医療機器事業部
長野県松本市笹賀5652-83
TEL 0263-29-2633(直通)
FAX 0263-29-2638
E-mail info-esform@esform.com
URL <http://www.esform.com>