

◆ ESF-24MP、ESF-24MZに発泡スチロール枕を貼り付ける場合

貼付前に枕と枕プレートの位置確認と目印を作ります。



頭尾方向の位置は、発泡スチロール枕頭部側の端を枕位置決め線に合わせます。
位置決め線は、A,B,C,Fの線があります。枕の種類と同じ記号の線に合わせてください。




枕位置決め線

左右方向は、枕が中央になるように合わせます。位置を合わせたら目印を付けてください。
(枕プレート裏面に補助線を書いたり、マスキングテープを貼るなど。)




目印例 (油性ペン)

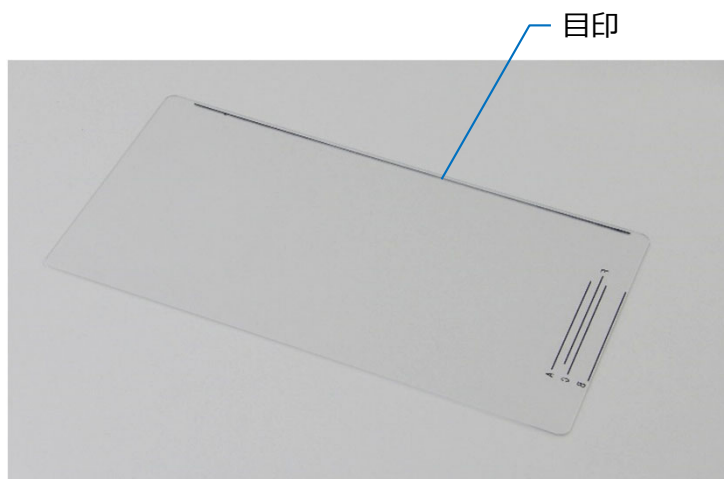

目印

枕の裏面に両面テープを3か所ほど貼ります。

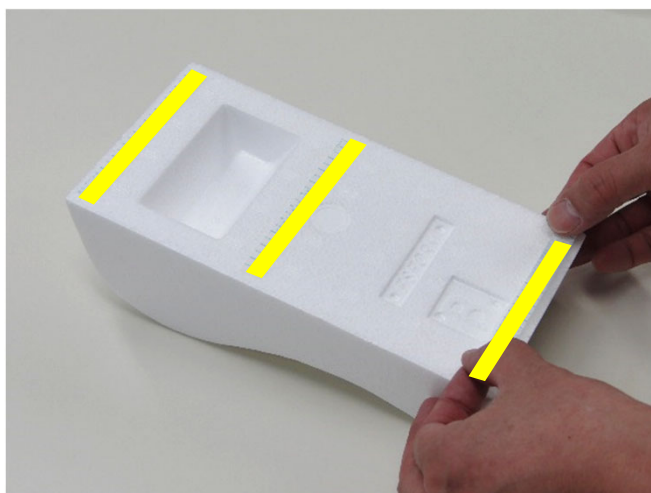

枕位置決め線と目印に合わせて、枕と枕プレートを貼り合わせます。



目印を除去して完成です。



◆ ESF-24MUに発泡スチロール枕を貼り付ける場合

ESF-24MPUに位置決め線はありません。

治療姿勢に合わせて貼り付け位置を決め、目印を付けて、貼り合わせてください。

枕の首を支える凸部分を基準に位置を決めると、枕の種類による頭の位置ずれが少なくなります。

◆ ESF-24MZ、ESF-24MUにエスエス枕を貼り付ける場合

位置決め線は使用せず、治療姿勢に合わせて貼り付け位置を決め、目印を付けて、貼り合わせてください。

枕の首を支える凸部分を基準に位置を決めると、枕の種類による頭の位置ずれが少なくなります。

◆ 注意事項

- 本品を枕に貼り付ける前に、貼り付け面の汚れを落としてください。
- 貼り付け後は、しっかりと圧着してください。
- 枕を貼り替えるときは、古い両面テープを剥がしてから作業を行ってください。

◆ 枕プレート対応表

枕プレート	枕	適用固定具
ESF-24MP	ESF-24、ESF-25A/B/C/F、 ESF-26※	エスフォーム ESF-11N、ESF-12N、ESF-12NE、ESF-15HA、 ESF-WGS、ESF-17C、ESF-KSE、ESF-KSC
ESF-24MZ	ESF-24、ESF-25A/B/C/F、 ESF-27	エスフォーム ESF-15C
ESF-24MU	ESF-24、ESF-25A/B/C/F、 ESF-27	CIVCO社 ユニフレーム、Type-S

※ESF-26はESF-WGSのみ適用できます。